

ALDENA, NITRILNE ROKAVICE, ČRNA. VELIKOST: S, M, L, XL - 100 KOM.

NITRILE GLOVES Powder free / Latex free / Non-Sterile / Single use only BLACK

Zaščitne in pregledovalne rokavice za enkratno uporabo iz nitril butadien kavčuka (NRB), brez pudra, nesterilne. Obojestransko uporabne. V skladu z Evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 in standardom EN 455. Medicinski pripomoček razreda I. v skladu z Evropsko uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425 ter standardoma EN 420 in EN 374. Kategorija III - zaščitne rokavice za kemične nevarnosti. Najmanjša dolžina 240 mm. Brez naravnega lateksa. Sintetični kopolimer. Izdelek vsebuje ditiokarbamat – ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na te snovi. Pred uporabo preverite morebitne poškodbe embalaže, ne uporabljajte poškodovanih rokavic. Hraniti v originalni embalaži v suhem in temnem prostoru od 10 °C do 40°C. Zaščititi pred ozonom. Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi. Proizvajalec: Zibo Blue Sasil Innovation Co., Ltd, Qungtian Road št. 21, Quilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414, Kitajska. Predstavnik ES Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti: Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, Ie Verd 2595AA, Haag, Nizozemska. Zasnoval in uvozil: ALDENA EOOD, Sredets Str. 5, 4003 Plovdiv, Bolgarija.

NITRILE GLOVES/GANTS NITRILE/NITRILNE ROKAVICE

MD – Medicinski pripomoček razreda 1 v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih 2017/7, razred I, EN 455 1, 2, 3 in 4.

Uredba o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425, kategorija III, EN 374 1, 4 in 5.

Uporabljeni standardi/tehnične specifikacije:

EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tip B; EN ISO 374-5:2016

Identifikacijska črka	Kemični test	Stopnja prepustnosti
K	Natrijev hidroksid 40%	Stopnja 6
P	Vodikov peroksid 30%	Stopnja 6
T	Formaldehid 37%	Stopnja 6

Raven učinkovitosti 1-2-3-4-5-6, Min. časi preboja (min) >10>30>60>120>240>480

EN 374-5:2016 – raven, Zaščita pred bakterijami in glivicami – ustrezno, Zaščita pred virusi – ustrezno.

Proizvedeno na Kitajskem.

Oblikovanje: ALDENA EOOD, 5 Sredets str., 4003 Plovdiv, Bulgaria

Referenca izdelka proizvajalca: BS0102057

Kataloška številka: NBK30M


Datum zastarelosti: 2029-04-10

Distributer: Luxus plus d.o.o., Krekova 9, 2310 Slovenska Bistrica





EU pregled tipa in ugotavljanje skladnosti na podlagi Uredbe(EU) 2016/425, Priloga V (Modul B) strani: SATRA. Technology Europe Limited (NB 2777), Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Irska.

KAKO SI NADETI ROKAVCE?

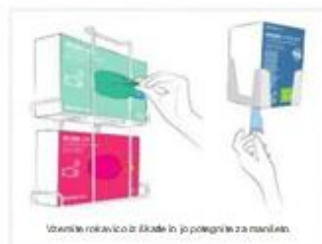

KAKO SNETI ROKAVCE?

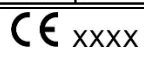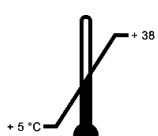

SI – NAVODILA ZA UPORABO Pregledne in zaščitne rokavice iz nitrila za enkratno uporabo; brez pudra, nesterilne, skladne z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih, EN ISO 21420 in EN ISO 374.							
Navodila za uporabo je treba uporabljati v kombinaciji s specifičnimi podatki o izdelku na vsaki embalaži izdelka. Rokavice se prodajajo kot enota v paketu v škatli za pošiljanje. V primeru, da so izdelki v paketu ločeni in se prodajajo ločeno, mora distributer zagotoviti, da so navodila za uporabo priložena vsaki ločeni enoti. Rokavice so v skladu z Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425 razvrščene kot osebna zaščitna oprema (OZO) kategorije III in z veljavnimi usklajenimi evropskimi standardi je bilo dokazano, da so skladne s to uredbo. Skladno z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih se rokavice uvrščajo v razred I. Rokavice so zasnovane tako, da zagotavljajo zaščito pred posebnimi kemikalijami, mikroorganizmi in radioaktivno kontaminacijo delcev (če obstaja). Rokavice ustrezajo standardom EN/ISO, navedenim na vsaki specifični embalaži. Ta osebna zaščitna oprema je samo za enkratno uporabo in jo je treba odstraniti po kontaminaciji.							
RAZLAGA STANDARDOV IN SIMBOLOV:							
EN ISO 374-1	Ravni delovanja proti prepustnosti so določene na podlagi prebojnih časov (preizkušeno v skladu z EN 16523-1: 2015), kot sledi:						
Tip A / B / C	Stopnja učinkovitosti proti prepustnosti po EN ISO 374-1:2016+A1:2018	1	2	3	4	5	6
	Minimalni čas preboja v minutah	10	30	60	120	240	480
 ABCDEFGHIJKLMNPST	Tip A = Čas preboja kemikalije > 30 minut proti najmanj 6 kemikalijam na seznamu. Tip B = Čas preboja kemikalije > 30 minut proti najmanj 3 kemikalijam na seznamu. Tip C = Čas preboja kemikalije > 10 minut proti vsaj 1 kemikaliji na seznamu. PRESKUSNE KEMIKALIJE: A = metanol/B = aceton/C = acetonitril/D = diklorometan/E = ogljikov disulfid/F = toluen/G = dietilamin/H = tetrahidrofuran/I = etil acetat/J = n-heptan/K = natrijev hidroksid 40 %/L = žveplovna kislina 96 %/M = dušikova kislina 65 %/N = očetna kislina 99 %/O = voda amoniaka 25 %/P = vodikov peroksid 30 %/S = fluorovodikova kislina 40 %/T = formaldehid 37 %						
EN 374-4:2019	Razgradnja (v %) označuje spremembo odpornosti rokavic na prebod po izpostavljenosti ustrezni preskusni kemikaliji.						
Ti podatki ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlikovanja med mešanici in čistimi kemikalijami. Odpornost proti kemikalijam in prodiranju je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih z uporabo vzorcev, vzeti samo iz dlani, in se nanaša samo na preskusne kemikalije. Rezultati so lahko drugačni, če se kemikalije uporabljajo v mešanici. Priporoča se preverjanje, če so rokavice primerne za predvideno uporabo, ker se lahko pogoji (kot so temperatura, odrgnine in razgradnje) na delovnem mestu razlikujejo od pogojev testiranja. Rabljene rokavice lahko povzročijo manjšo odpornost na nevarno kemikalijo zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premiki, trganje, drgnjenje, razgradnja zaradi kemikalij v stiku s rokavicami itd. lahko znatno skrajšajo dejansko življenjsko dobo rokavic. Pri jedkih kemikalijah je lahko odpornost proti razgradnji najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih proti kemikalijam. Pred uporabo preglejte rokavice, da nimajo nobenih napak ali pomanjkljivosti.							
 Virus	Preskušeno za prepustnost v skladu z EN 374-2:2014 Preskušeno za odpornost proti penetraciji patogenov, ki se prenašajo s krvjo, v skladu z EN ISO 374-5 / ASTM F1671 (odpornost na viruse). Odpornost na bakterije in glive – opravljeno Odpornost na viruse – opravljeno Odpornost na vdor je bila ocenjena pod laboratorijskimi pogoji in velja samo za testni vzorec.		Rokavice so samo za enkratno uporabo in niso za ponovno uporabo.				
			Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.				
			Zaščitite pred vlago.		Zaščitite pred sončno svetlobo.		
 AQL 1.5	Sprejemljiva raven kakovosti (<i>Acceptable Quality Level</i>) v % maks. deleža blaga z napako		Ta izdelek ni sterilen.				
	Primerno za stik z živili (razen kislih živil)		Izdelek ne vsebuje lateksa				
	Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti		Medicinski pripomoček				
	XXXX = številka priglasenega organa, pristojnega za EU-pregled tipa in nadzor nad stalno skladnostjo.		Serijska koda				
	Datum proizvodnje		Uporabno do				
PREVIDNOSTNI UKREPI						SESTAVINE / NEVARNE KOMPONENTE	
Pred uporabo vedno preverite, da na rokavicah ni mehanskih poškodb, npr. lukenj ali raztrganin. Ne uporabite poškodovanih rokavic. Izberite rokavice z dolžino primerno za vas, kajti tveganje za področje zapestja je minimalno. Pravilno nadevanje in snemanje rokavic je večšina, ki jo morajo vaditi zdravstveni delavci ali drugi, ki uporabljajo rokavice. Nadevanje je treba opraviti v pravilnem vrstnem redu, da se prepreči prenos okužb. Preden si nadenete rokavice, naj bodo roke čiste. Ko odstranjujete rokavice, se izogibajte stiku zunanje površine rokavic s kožo, ker je bila površina morda okužena s krvjo ali drugimi telesnimi tekočinami. Izogibajte se trganju, saj lahko to povzroči, da onesnaževalci brizgajo v oči ali usta ali na kožo ali druge ljudi v bližini.						Nekateri rokavice lahko vsebujejo sestavine, za katere je znano, da povzročajo draženje kože ali alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih. Preverite opozorila na specifični embalaži. Formulacijo bomo posredovali na zahtevo.	
TEMPERATURNE OMEJITVE		NAVODILA ZA SHRANJEVANJE		NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE			
		Prostor za shranjevanje mora biti hladen, suh in brez prahu. Rokavice zaščitite pred viri UV svetlobe, sončno svetlobo, ozonom in oksidacijskimi snovmi. Shranjujte v originalni embalaži skladno s temperaturnimi omejitvami, označenimi na embalaži.		Rokavice odstranite v skladu z veljavnimi predpisi za material rokavic. Rokavice, kontaminirane s kemičnimi snovmi, je treba odstraniti v skladu s predpisi za zadevne kemikalije.			



ALDENA
Profesionalna nega

Nitrilne rokavice Aldena Tech

Te nesterilne rokavice so izdelane iz tanjše formule, ki zagotavlja odlično taktilno občutljivost in spretnost, hkrati pa izjemno udobje, prileganje in občutek. Visokokakovostna izdelava zagotavlja, da bodo te rokavice zdržale različne postopke.



Specifikacije izdelka

Blagovna znamka	ALDENA (ref. št. TBK35)
Material	Nitril (nitril butadienski kavčuk - NBR)
Barva	Črna
Razpoložljive velikosti	XS (5/6), S (6/7), M (7/8), L (8/9), XL (9/10)
Dolžina	Mediana 240 mm
Debelina stene	Manšeta 0,06 mm; Dlan 0,07 mm; Prst 0,11 mm
Teža	3,5 g (za velikost M)
Sila pri pretrganju	≥ 6,4 N (Newtonov)
Zunanost	Teksturirana za prste
Notranja obdelava	Brez pudra
Rok uporabnosti	5 let
Primerno za stik z živili	V skladu z uredbo EU 1935/2004
Namen	Večnamenske rokavice za enkratno uporabo: Uporabljajo se lahko kot rokavice za čiščenje gospodinjstva, rokavice za zdravniške preglede, kuhanje, pripravo hrane, peko na žaru, osnovno laboratorijsko delo, barvanje las, tetoviranje, slikanje, v industriji.
Simboli in piktogrami na škatli	   
Država izvora	Malezija



ALDENA
Profesionalna nega



ALDENA
Profesionalna nega

Nitrilne rokavice Aldena Tech

Te nesterilne rokavice so izdelane iz tanjše formule, ki zagotavlja odlično taktilno občutljivost in spretnost, hkrati pa izjemno udobje, prilaganje in občutek. Visokokakovostna izdelava zagotavlja, da bodo te rokavice zdržale različne postopke.



Informacije o embalaži in logistiki

	Dozirna škatla	Transportna škatla	Paleta
Embalaža	100 rokavic na škatlo	10 škatel na škatlo	96 škatel na paletu, 8 plasti po 12 škatel
Dimenzije	20 x 11 x 6 cm	31 x 23 x 21 cm	120 x 80 x 190 cm

Kataloška št.	Velikost	EAN Notranja škatla	EAN škatla	Teža škatle
TRB35XS	XS	8683020024021	8683020024076	3,7 kg
TRB35S	S	8683020024038	8683020024083	4,0 kg
TRB35M	M	8683020024045	8683020024090	4,3 kg
TRB35L	L	8683020024052	8683020024106	4,6 kg
TRB35XL	XL	8683020024069	8683020024113	4,9 kg

Jeziki	EN - FR - BG - DE - IT - NL - GR - RO
Koda HS	40151900

Slike izdelkov



ALDENA
Profesionalna nega