



GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.

**CL-031**

# 3 in1 stroj za hujšanje z infrardečo presoterapijo EMS



**TGA**



**CL-031**



**ISO13485 (€) RoHS**



## GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.

### Uvod

Stroj lahko izboljša kroženje limfe, odvaja odpadke iz telesa, razlikuje se od vibracij rezin, saj sprejme zračni pritisk za premikanje maščobe. Hkrati usposobljena oseba uporabi postopke, ki pomagajo pospešiti kroženje limfe in izločanje odpadkov iz telesa, kot so cirkulacija, masaža, revolucija, oprijem itd. Zračni val skozi mehak naravni zrak za masažo ne bo škodoval ljudem in ne bo imel neprijetnega občutka. Tlak na eni strani zračne komore znaša 200000 Pa in kadar ga 30 minut uporabljamo za trebuh, je porabljena energija enaka 150 trebušnjakom. Stroj z imenom "Pometalnik" lahko pospeši notranjo cirkulacijo zračnih komor, ki se nahajajo okoli trebuha, stegna in meče, da odvaja toksine iz telesa in prilagodi cirkulacijo.

### Prednosti stroja:

1. Dobra kakovost: stroj s plastičnim ohišjem je najboljše kakovosti od vseh strojev. Prevleka je iz PU materiala, ter je enostavna za čiščenje. Odeja je z dvoslojnim PU materialom. Priključek je iz umetne snovi, je enostaven in priročen za priključitev.
2. Dobra funkcija: funkcija zračnega tlaka in funkcija infrardečega ogrevanja lahko delujeta ločeno na vsakem delu. 20 skupin zračnih komor, 8 izhodov za zrak in 7 skupin infrardečega ogrevanja, 3 skupine infrardečih izhodov.
3. Enostavno upravljanje: stranka lahko prilagodi intenzivnost zračnega tlaka in infrardečega ogrevanja, izberete, kateri del bo obdelala.
4. Dober občutek: med zdravljenjem ni prisotnih bolečin, telo je sproščeno, tretma je podoben občutku ročne masaže. Temperatura je med 35 in 80 stopinjami.
5. Dober rezultat: oblačila lahko uporabljate vsak dan. Ljudje lahko v dveh mesecih izgubijo 15 do 30 kg.
6. Varna oblačila: napetost naših oblačil je 36V.

Prenosni paket: 51 \* 40 \* 22CM (stroj), 80 \* 40 \* 20CM (obleka in odeja skupaj)

### Specifikacija stroja:

1. 20 skupin zračnih komor, 8 skupin odprtih za zrak, 7 infrardečih ogrevalnih naprav, 3 infrardeče ogrevalne odprtine.
2. Stroj je iz železnega materiala, oblačila so iz PU materiala, plošča pa iz pleksi stekla.
3. Prostornina plina: 25L / min.
4. Tlak: 0.025Mpa.
5. Velikost pakiranja: 51\*40\*22CM (stroj), 80\*40\*20CM (obleka in odeja skupaj).
6. Volumenska teža: 32KG.
7. Dejanska teža: 20KG.
8. Temperatura: 35 ~ 80 stopinj
9. Moč: izmenični tok 220V~240V (110V~120V), 50HZ~60HZ.

### Funkcija daljinskega infrardečega in zračnega tlaka

1. Raztapljanje maščob
  - a. Far infrardeče deluje na maščobno tkivo in raztaplja maščobne celice s toplotnim sevanjem. Količina maščobnih celic se močno zmanjša.
  - b. Redno napihovanje in izpuhavanje ter spremenljiv zračni tlak povzroča drgnjenje in drobljenje maščobnih celic
2. Izločanje maščob

Daljni infrardeči sproščajo veliko toplotne energije, pospešujejo prekrvavitev in biokemične reakcije, spodbujajo metabolizem, porabijo veliko AIP in vodijo v katabolizem maščobe C.
3. Zmanjšanje maščobe




## GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.

Toplotno sevanje dvigne temperaturo lokalnega tkiva, pore kože se razširijo, v veliki meri pride do znojenja, izočanja vode.

4. Izločanje limfnih toksinov
  - a. Kapilara se širi, pospešuje krvni obtok, odpadki metabolizma in raztopljeni maščobi vstopajo v kri in limfo.
  - b. Zračna komora deluje bolj redno in pomanjkljivo zaradi zračnega tlaka, spodbuja refluks limfnega sistema in odvaja toksine iz telesa.
5. Remisija mišičnega krča  
Daljinsko infrardeče obsevanje zmanjšuje napetost gladkih mišic okostja ter olajša napetost mišic.
6. Drugo  
Zmanjšanje vnetja, analgezija, spodbujajo regeneracijo tkiva, zmečajo brazgotino.

Prva povezava:

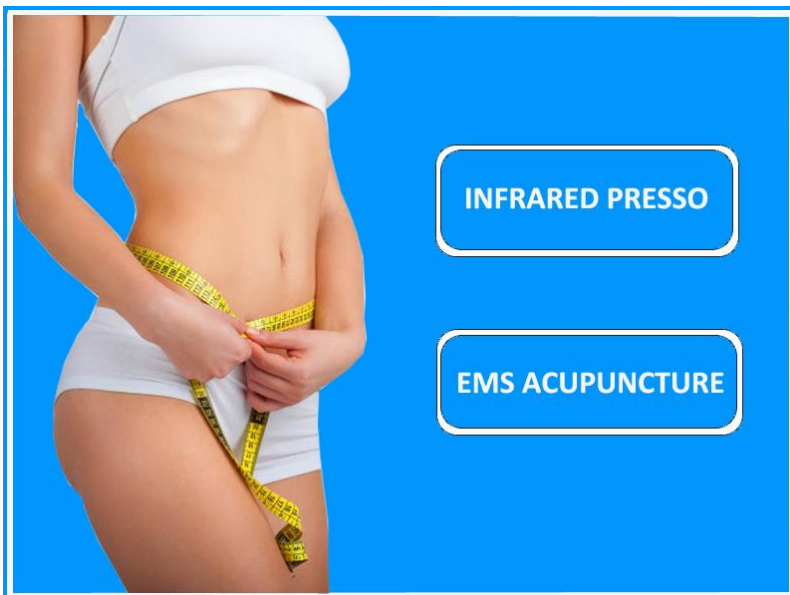


Izberite funkcijo infrardečega tiska ali funkcijo ems.

**Vmesnik presoterapije in infrardečega ogrevanja:**




GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.

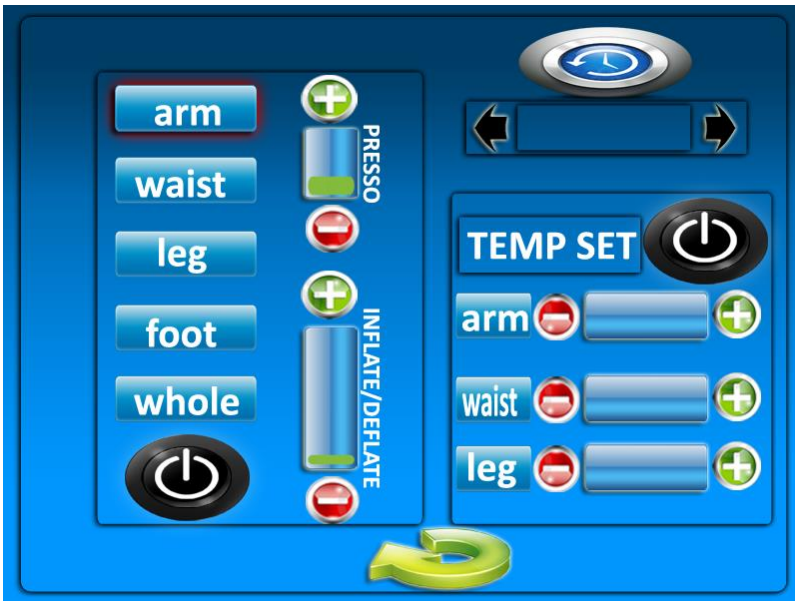

Gumb na nadzorni plošči CL-031: (glede na sliko nadzorne plošče)

1)  Najprej prilagodite čas.

2)  Prilagodite intenzivnost pritiska.

3)  Prilagodite čas INFLATE / DEFLATE.

4)  Izberite kategorijo, ki jo potrebujete.

5)  Zaženite funkcijo presso.



GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.



6) izberite nastavitvev




Prilagodite temperaturo vsakega

dela. Zaženite funkcijo infrardečega ogrevanja



Vmesnik ems akupunktura:

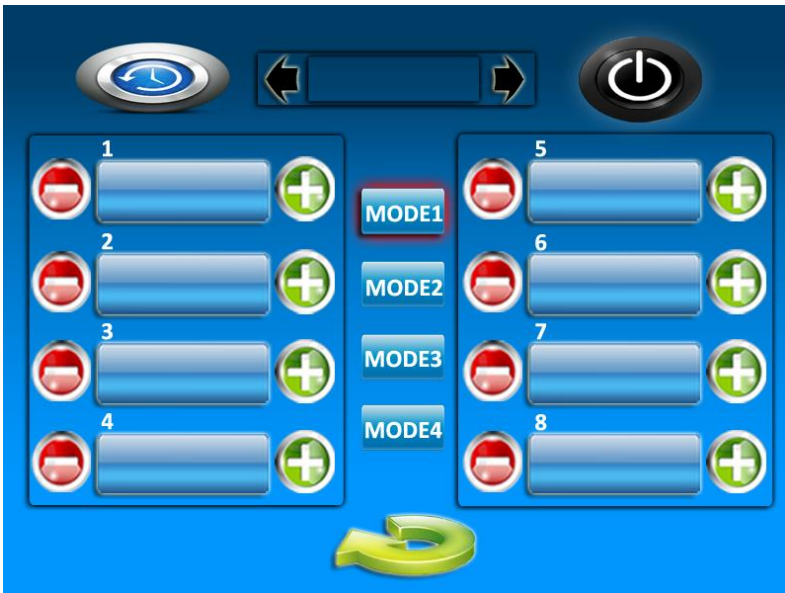

1) Najprej prilagodite čas



2) Izberite nastavitvev





GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.



3) Prilagodite intenzivnost ams akupunktura 1.

2.



4 Zaženite funkcijo

Opomba: obleka z napetostjo 36 V in transformator 32 V, da se izognete prevelikemu segrevanju oblačil in zagotovite, da so oblačila varna za stranko, zato oblačila potrebujejo nekaj minut za ogrevanje na visoki temperaturi.

#### Predlagano delovanje ems akupunktura:

② Na elektro obliže nanesite nekaj gela ali kreme za hujšanje in jih popravite s fleksom na delu telesa.

②Obliž prilepite na dele telesa, kot na slikah:

Slika 1: Vrat in rame

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka na vratu in rami, odstranite jim lahko maščobo in bolečino.



Slika 2: Vrat in ramena ter roka

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka na vratu, rami in roki, da odstranite maščobo.



Slika 3: Dojka

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka dojke. Spodbuditi razvoj dojke, ki lahko prilagodi izločanje hormonov.



Slika 4: Trebuh

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka trebuha in odstranitev maščobo ter toniranje



naprej



mišic

Slika 5 Hrbet

Funkcija: spodbuditi krvni obtok na hrbtu in tonizirajo mišico na hrbtu, kar lahko odstranite odvečno maščobo in ublažite utrujenost.




Slika 6: Kolk

Funkcija: spodbuditi krvni obtok v kolku, odstranitev odvečnih maščob in toniranje mišica kolka.



Slika 7: Roka

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka na rokah in odprtje kanala, za odstranitev odvečne maščobe in toniranje mišice roke.

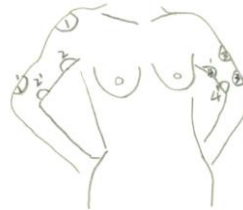

Slika 8 Noga

Funkcija: Spodbujanje krvnega obtoka na nogah in odprtje kanala, za odstranitev odvečne maščobe in toniranje mišice noge.



#### Korak kozmetičarke v kozmetičnem salonu:

- 1) Najprej očisti stranko.
- 2) Stranki nanese olje za hujšanje na kožo.
- 3) Na stranko zavije zaščitno folijo (folija za zavijanje hrane).
- 4) Nadane oblačila, nato pa pusti, da stroj deluje skupaj z oblačili.
- 5) Najprej uporabi funkcijo infrardečega ogrevanja, nato funkcijo zračnega tlaka. Bolje je za hujšanje.

#### Prednost izločanja limfnih toksinov

1. Limfni sistem je pomemben obtočni sistem, enak je izločanju v telesu, je tudi temelj za zbiranje toksinov vseh vrst organov v telesu. V procesu prenosa kisika po krvi zbira toksine, filtrira in čisti odpadke metabolizma, nato prenaša v ledvice in odvaja vodo iz telesa. Če se limfni sistem spusti, se toksini zberejo in preidejo v edem. Slaba cirkulacija bo povzročila nalaganje toksinov, maščob, obarvanje kože, akne na obrazu itd. Masaža za izločanje limfnih toksinov je v glavnem z masažo in eteričnim oljem, ki pogloblja krvni obtok telesa,



## GUANGZHOU CORELASER BEAUTY EQUIPMENT CO.,LTD.

da bi spodbudila izločanje toksinov iz telesa. Stroj za izločanje limfnih toksinov z daljinskim infrardečim zračnim tlakom lahko zelo dobro reši težavo.

2. Na splošno je 15 ~ 20 dni enkrat, po 2 ~ 3-krat, bota obraz in telo videti bolje. Zagotovljeno je zdravo lepotno življenje. Toksin ni pravi toksin, je zgolj naplavina telesa.
3. Neinvazivna aplikacija brez antiteze.
4. Učinkovitost s popolno varnostjo, brez bolečin. 15 ~ 20 minut, kratek čas zdravljenja z dolgotrajnim učinkom.
5. Enostavno zdravljenje z avtomatiziranim daljinskim infrardečim in zračnim tlakom.

### Lastnosti

1. Digitalni sistem za nadzor frekvence zagotavlja enakomerno in natančno oddajanje energije.
2. Anestezija z sproščenim zdravljenjem je udobna, z njo se znebite trdega maščobnega tkiva.
3. Za zdravljenje potrebujete le 15 ~ 20 minut, kar ne vpliva na vaše delo ali študij.
4. Zdravljenje ne povzroča bolečin, invazivnosti ali neželenih učinkov.
5. Zdravljenje se ne povrne, učinek pa je izjemen in dolgotrajen.
6. Kratko zdravljenje, rezultat hitro viden, ni potrebe po dieti.



### Pozor

1. Prosimo, ne razstavljajte opreme in ne poskušajte izvajati drugih postopkov, ki niso navedeni v naših navodilih. Vsa popravila mora opraviti naše strokovno usposobljeno osebje.
2. Te opreme ne sestavljajte in ne uporabljajte, ko ste blizu vode ali imate roke mokre. Pazite, da na to ne polijete tekočino.
3. Izvlecite vtič iz vtičnice, ob primeru spodaj navedenih pogojev, ostanite v stiku s postajo za profesionalno vzdrževanje.
  - a) Oprema je prišla v stik s tekočino.
  - b) Oprema ima nenavaden vonj, iz nje se kadi ali ima glasen in močan hrup.
  - c) Kabel je pokvarjen.
  - d) Oprema je padla in je pokvarjena.
4. Prosimo, ne dajajte ničesar na kable, opreme ne postavljajte, kjer lahko nekdo stopi na kabel.
5. Prosimo, izvlecite napajalni kabel, potem ko ste ga uporabili zaradi vaše varnosti
6. Ne vtikajte ničesar v vtičnico opreme, sicer lahko povzročite požar. Če kaj vstopi v opremo, je ne izberite sami, pogodbeni distributer ali naše podjetje
7. Ne postavljajte opreme na vse, kar ne more mirno stati, izogibajte se obračanju in poškodbam.
8. Naše podjetje ima pravico spremeniti podatke v tem uvodu, preden o tem obvesti! In naj bodo pojasnila prava za zgoraj.
9. Prepričajte se, da ljudje, ki imajo srčne bolezni, ne morejo uporabljati stroja.
10. Prepričajte se, da ljudje, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik, ne morejo uporabljati naprave.
11. Noseče osebe ne morejo uporabljati stroja.
12. Ženska, ki je v menstruaciji, ne more uporabljati stroja.
13. Ljudje, ki so lahko razdražljivi, ne morejo uporabljati stroja.
14. Ljudje, ki imajo hemofilijo ali drugo nalezljivo dermatozo, ne morejo uporabljati stroja.
15. Ljudje, ki so zdravilo uporabljali v bolnišnici, stroja ne morejo uporabljati